

Vetup Manager

Idexx Integration

Versions du document

Version	Date	Auteur(s)	Détail
1.0	15/04/2014	FF	Création - brouillon
1.1	25/07/2015	FF	maj

[I - Présentation](#)

[II Descriptif de l'installation](#)

[III Activation](#)

[Activation du module Idexx dans la console Vetupmanager](#)

[Activation du module Idexx dans l'application Vetup manager](#)

[Paramétrage des types d'analyse et des modèles d'analyse](#)

[Paramétrage du module ICP](#)

[Paramétrage du module Interlink](#)

[Paramétrage du module IVLS](#)

I - Présentation

L'intégration entre le logiciel Vetup manager et Idexx Vet Lab Station consiste en la mise en place d'outils permettant la communication bi-directionnelle entre ces deux applications.

Un fois l'intégration mise en place, il est possible d'initier une demande d'analyse depuis le logiciel Vetup, de la transférer vers la station Idexx et de récupérer le résultat de l'analyse une fois celle ci réalisée.

II Descriptif de l'installation



1- Poste client installé dans la clinique utilisant un navigateur (chrome, firefox,...) pour accéder à l'application Vetup manager.

2- Serveur internet Vetup hébergeant l'application Vetup manager dans le cloud

3- Module ICP installé sur un poste de la clinique ayant un accès internet

4- Module Interlink installé sur le même poste que le module ICP

5- IDEXX Vet Lab Station

III Activation

L'activation de l'intégration nécessite plusieurs étapes

Activation du module Idexx dans la console Vetupmanager

Il est obligatoire de contacter l'équipe Vetup pour qu'elle puisse ouvrir les droits au module Idexx.

Une fois l'activation réalisé, un nouvel onglet est présent dans le menu "**paramètres de l'application**" de l'application Vetup.



Paramètres de l'application ✕

Général Produit Rappels Divers **IDEXX**

IDEXX

Unit Id

Mdp envoi des demandes d'analyse

Mdp reception des résultats d'analyse

Activation du module Idexx dans l'application Vetup manager

Il est obligatoire d'activer le module Idexx via la case à cocher.

L'IVLS devra être identifié par un numéro unique.

Les accès doivent être conditionnés à un mot de passe.

Une fois l'activation réalisé, l'onglet est normalement présent sous cette forme :



Paramètres de l'application ✕

Général Produit Rappels Divers **IDEXX**

IDEXX

Unit Id

Mdp envoi des demandes d'analyse

Mdp reception des résultats d'analyse

Paramétrage des types d'analyse et des modèles d'analyse

Pour être utilisable dans les consultations, l'intégration Idexx doit disposer d'une nomenclature de demandes d'analyse.

Pour définir cette nomenclature, il est d'abord nécessaire de définir un ou plusieurs types d'analyses à partir du menu "**Types d'analyse IDEXX**"

Types d'analyses IDEXX

Nom
BIOCH
catégorie test
ELECTROLYTES
NFS
PROTOCOLES

Une fois un ou plusieurs types d'analyse définis, il est possible de définir les analyses qui seront utilisables pour les consultations dans le menu "**Analyses IDEXX**"

Analyses IDEXX

Désignation	Type d'analyses IDEXX	Prix TTC
ANALYSE 1 PARAMETRE	BIOCH	10.00
CHEM10	BIOCH	48.00
CHEM15	BIOCH	65.00
CHEM17	BIOCH	69.00
CREAT	BIOCH	10.00
FRUCTO	BIOCH	26.00
GLU	BIOCH	10.00
LYTE4	ELECTROLYTES	20.00
NFS	NFS	29.00
PHENOBARBITAL	BIOCH	41.00
PREOP	PROTOCOLES	0
RPCU	BIOCH	25.00
UREE	BIOCH	10.00

Paramétrage du module ICP

L'installation du module ICP doit se faire en conservant les paramètres par défaut.

Une fois le module installé, certains paramètres doivent être finalisés :

Le champs **UnitID** doit comporter la même valeur que le champs "**UnitId**" de l'écran "**paramètres de l'application**" de Vetup.

Les 2 champs "**password**" doivent comporter les même valeurs que les "**Mdp**" de l'écran "**paramètres de l'application**" de Vetup.

Le champs "**Work Request Service Uri**" doit comporter l'adresse du web service délivrant les demandes d'analyse saisies dans Vetup.

L'adresse est de la forme :

https://XXX.vetupmanager.com/modules/idexx/icp/soapOutput.php

ou XXX est le nom de l'installation Vetup du client.


Le champs "**Result Service Uri**" doit comporter l'adresse du web service réceptionnant les résultats concernant les demandes d'analyse saisies dans Vetup.

L'adresse est de la forme :

https://XXX.vetupmanager.com/modules/idexx/icp/soapInput.php

ou XXX est le nom de l'installation Vetup du client.

La case à cocher "**Autostart**" doit être cochée pour exécuter le module ICP dès le démarrage du poste sans intervention humaine.

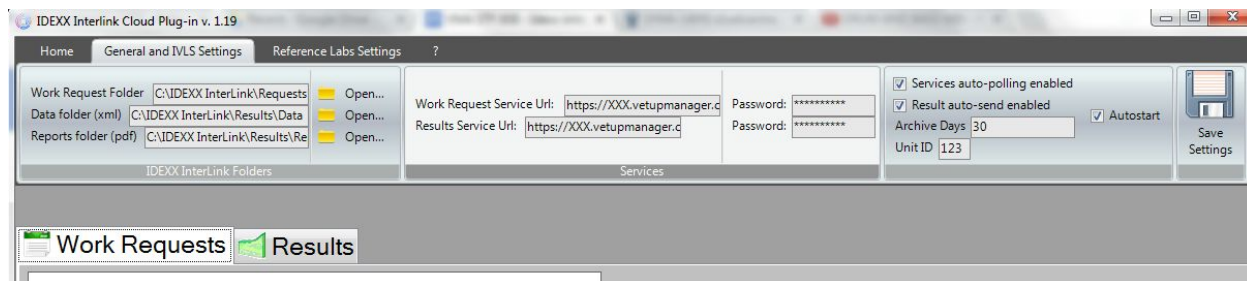

Paramétrage du module Interlink

L'installation du module Interlink doit se faire en conservant les paramètres par défaut. Normalement les paramètres par défaut doivent correspondre aux paramètres par défaut du module ICP pour les propriétés suivantes :

- Répertoire de stockage des rapports PDF
- Répertoire de stockage des données XML
- Répertoire de stockage des demandes d'analyses

IDEXX Interlink version 2.0

IDEXX InterLink télécharge automatiquement les résultats de vos patients à partir de la IDEXX VetLab Station.

IDEXX VetLab Station

IDEXX VetLab Station | Noms des fichiers | Gérer les connexions | À propos

Connexion à l'IDEXX VetLab Station : Activée (détection automatique) Activée (manuelle) Désactivée

Nom de la connexion : InterLink

Enregistrer les rapports PDF (Remarque : ceci peut être activé ou désactivé sur l'IDEXX VetLab Station) :

Localisation: C:\IDEXX Interlink\Results\Reports\ Naviguer

Enregistrer les données XML : Oui Non

Localisation: C:\IDEXX Interlink\Results\Data\ Naviguer

Envoyer des demandes d'analyses /messages de recensement : Oui Non

Localisation: C:\IDEXX Interlink\Requests\ Naviguer

Appliquer les modifications Fermer Quitter

IDEXX LABORATORIES

Paramétrage du module IVLS

Un certain nombre de paramètres doivent être vérifiés ou adaptés au niveau de l'écran de contrôle de l'IVLS.



L'onglet "Logiciel de gestion vétérinaire" du menu "Configuration" doit ressembler à ça.



L'onglet "Logiciel de gestion vétérinaire" du menu "Instruments" doit ressembler à ça.

Instruments

Accueil Aide 07:04

Système LaserCyte Dx VetTest VetLyte VetStat UA Analyzer
Catalyst Dx SNAPshot Dx Coag Dx ProCyte Dx Logiciel de Gestion Vétérinaire SNAP

Transfert des résultats

- Désactivé (Pas de transfert des résultats)
- Activé (Transmission des archives de résultats uniquement)
- Activé (Transmission des archives de résultats et du compte rendu)

Retransmettre

Archives existantes

Ne pas transmettre les archives créées précédemment:

< juin 2011 >

juin 2011

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

0 archives
ont été créées depuis cette date et n'ont pas encore été transmises.

STORIES

